


Beknopte handleiding voor gebruikers van de CP900 serie


Kenmerken van de telefoonclip

- Probleemloos en rechtstreeks handenvrij bellen via de geluidsprocessor van de CP900 serie.
- Luisteren naar de instructies van uw Bluetooth®-navigatiesysteem.
- Muziek streamen vanaf een Bluetooth-apparaat.

De telefoonclip kan eenvoudig worden bevestigd op uw kleding. De ingebouwde microfoon is in staat uw stemgeluid op te vangen en te verzenden, zelfs als uw telefoon zich enkele meters verderop bevindt.

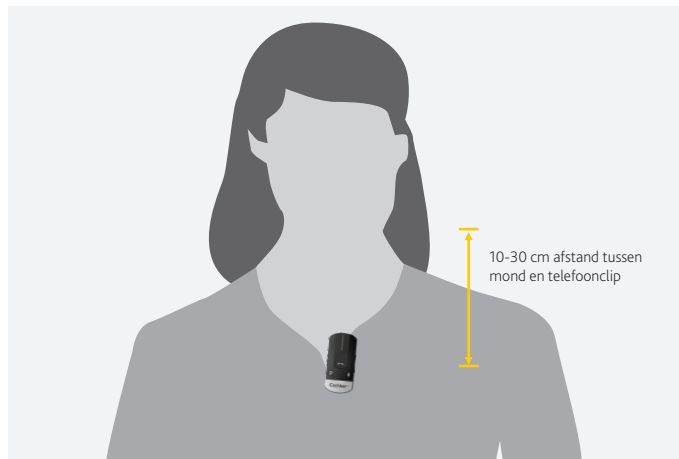

Productoverzicht

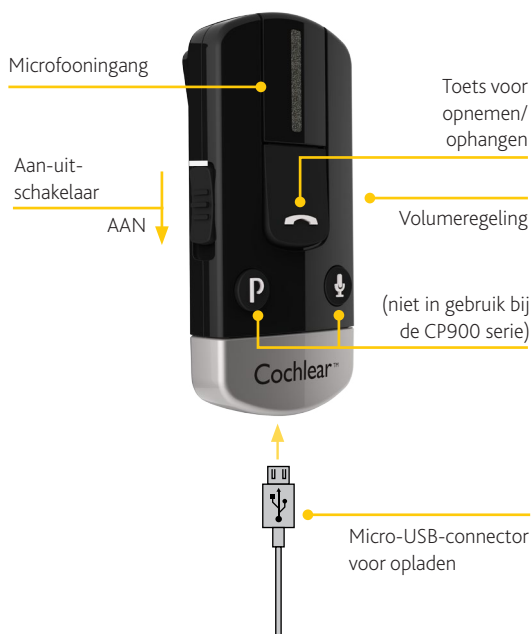

Aan de slag

De batterij opladen:

Steek de micro-USB-stekker van de meegeleverde oplaadkabel in de ingang van de telefoonclip. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer, of gebruik de meegeleverde adapter om de kabel aan te sluiten op een stopcontact.

Als het rode LED-indicatielicht aan de bovenkant van de telefoonclip groen wordt en elke 2 seconden rood knippert, is het opladen voltooid.

Voordat u de telefoonclip gaat gebruiken, moet deze minimaal 3 uur worden opgeladen, ook al geeft het indicatielicht aan dat het apparaat helemaal is opgeladen. De batterij kan niet worden overladen.

Opmerking: Als de telefoonclip volledig is opgeladen, biedt deze 6 uur gesprekstijd of 80 uur stand-bytijd.

Koppelen met de geluidsprocessor van de CP900 serie

- A** Schakel de geluidsprocessor van de CP900 serie uit.


Verwijder de geluidsprocessor van uw oor.
Houd de onderste toets twee seconden ingedrukt.



- B** Schakel de telefoonclip in en verwijder het zilverkleurige kapje.



- C** Druk met de punt van een pen of een vergelijkbaar voorwerp eenmaal op de koppelingsknop van de telefoonclip.

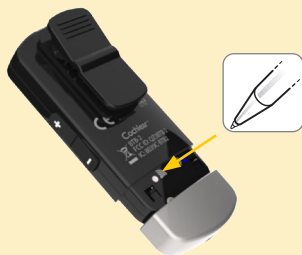

- D** Het LED-lampje knippert nu elke twee seconden geel en de telefoonclip bevindt zich gedurende 20 seconden in de koppelingsmodus.



- E** Schakel de geluidsprocessor in terwijl de koppelingsmodus actief is.

Druk op de onderste toets.

Er knippert een blauw indicatielicht om aan te geven dat de koppeling is geslaagd.




Koppelen met uw mobiele telefoon

- A** Schakel de telefoonclip in en verwijder het zilverkleurige kapje.



- B** Zorg dat de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor instructies. Druk eenmaal op de blauwe Bluetooth-koppelingsschakelaar van de telefoonclip om de koppelingsmodus gedurende 2 minuten te activeren.

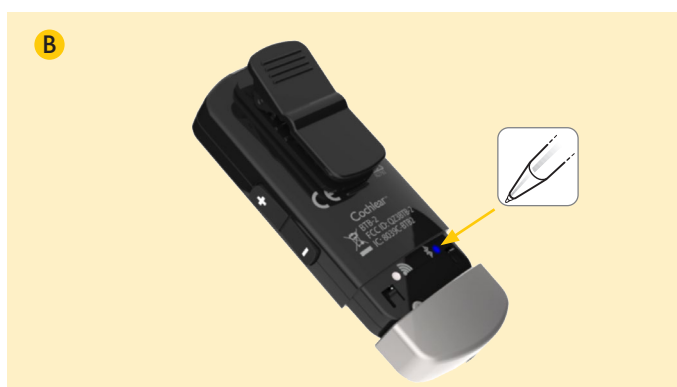

- C** Als de koppelingsmodus is geactiveerd, wordt het LED-indicatielicht blauw.



- D** Zoek op uw mobiele telefoon naar nieuwe Bluetooth-apparaten en selecteer "Hoortoesteltelefoon" in de lijst.

- E** Als uw mobiele telefoon vraagt om een wachtwoord, voer dan '0000' (vier nullen) in.

- F** Als het goed is, is de Phone Clip nu gekoppeld met uw mobiele telefoon. Als uw mobiele telefoon vraagt welke Bluetooth-service u wilt inschakelen, selecteert u "Hoofdtelefoon".

Indicatielichten (LED) op de telefoonclip

Het LED-indicatielicht aan de bovenkant van de telefoonclip fungeert als multifunctionele gebruikersinterface en geeft u informatie over de status van het apparaat.

Lichtpatroon	Betekenis
	Normale werking (groen)
	Batterij bijna leeg (geel)
	Bezig met opladen (rood)
	Volledig opgeladen - nog steeds aangesloten op de oplader (rood/groen)
	Gereed voor koppeling met de geluidsprocessor (geel)
	Gereed voor koppeling met het Bluetooth-apparaat (blauw)
	Bluetooth-gesprek actief (blauw)

Verbinding maken met uw mobiele telefoon

Voor het ontvangen van gesprekken of het kiezen van nummers moet de Bluetooth®-functionaliteit op uw mobiele telefoon zijn geactiveerd. Mogelijk vraagt de telefoon of u verbinding wilt maken met de telefoonclip nadat deze is gekoppeld.

Als u handmatig verbinding moet maken, zoek dan in het Bluetooth®-menu van uw telefoon naar de lijst met 'Gekoppelde apparaten'. Selecteer in deze lijst de optie "Hoortoesteltelefoon" en selecteer 'Verbinden'.

U kunt de telefoonclip nu gebruiken.

Op sommige telefoons kunt u ook de optie "Automatisch opnieuw verbinden" inschakelen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor instructies over hoe u dit doet.

Tip! Een geslaagde verbinding wordt op uw mobiele telefoon meestal weergegeven door het symbool van een headset.

De telefoonclip gebruiken

Oproepen/gesprekken beheren met de toets voor opnemen/opvangen



- **Binnenkomende oproepen:**
Druk één keer om een oproep te beantwoorden.
Druk twee keer om een oproep te weigeren.
- **Tijdens een oproep:**
Druk één keer om een gesprek dat werd gestart op uw telefoon door te schakelen naar de Phone Clip.
Houd de toets 2 seconden ingedrukt om een gesprek in de wachtstand te plaatsen.
- **Een nummer kiezen:**
Druk tweemaal op de toets om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen.
Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de functie voor spraakgestuurd kiezen te activeren.

Muziek streamen vanaf uw telefoon

U kunt de telefoonclip gebruiken om muziek te streamen vanaf uw mobiele telefoon of computer.

- Verbind het apparaat met de telefoonclip via Bluetooth.
- Start met het afspelen van muziek op het apparaat.
- U hoort het geluid dat vanaf het apparaat wordt gestreamd.
- Stop het afspelen van muziek op het apparaat om het streamen te stoppen.



Tip! Gebruik de volumeregeling op de telefoonclip om het volume te wijzigen.

Ondersteuning

Raadpleeg de meegeleverde handleiding bij uw telefoonclip en de handleiding van het draadloze accessoire voor alle informatie over de telefoonclip.

Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor alle informatie over de geluidsprocessor uit de Cochlear CP900 serie.

Bezoek voor verdere ondersteuning en video's de website van Cochlear: www.cochlear.com

Cochlear Wireless Accessories:

■ **Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

■ **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regionale kantoren:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECOREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus in Chinese tekens, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, het elliptische logo en Whisper zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix en WindShield zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015