

# Cochlear™

## Guia Rápido para os Processadores de Som Nucleus® CP910 e CP920

- ✓ Introdução
- ✓ Referência rápida



*Hear now. And always*



# Sobre

Seu processador de som Cochlear™ Nucleus® CP910 ou CP920 funciona com o implante coclear para transferir som para o ouvido.

## NOTA

Mais informações e avisos no  
*Guia do usuário do processador  
de som CP910 e CP920.*



# Processador de som

## Microfones e protetores

Luz indicadora

Botão superior

Botão inferior

Gancho auricular

Número de série



**Bobina**

Ímã da bobina

Cabo da bobina

**Unidade de Processamento**


Entrada de acessórios para conexão (somente CP910)

**Módulo de baterias recarregáveis padrão**



## Bloquear/ desbloquear bateria

Bloqueie a bateria das unidades de processamento CP910 ou CP920 para resistir a interferências.

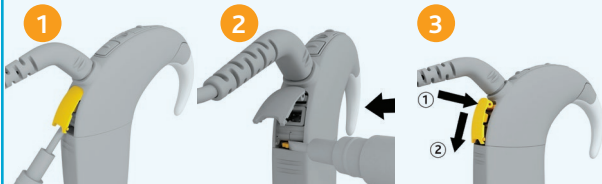


Abra cuidadosamente a tampa de acessórios *(somente CP910)*.


Para a esquerda para bloquear e para a direita para desbloquear.

Feche empurrando primeiramente a dobradiça *(somente CP910)*.

# Remover/conectar a bateria recarregável

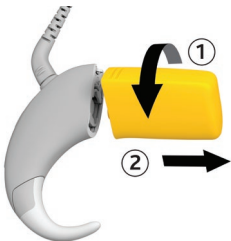

Remover

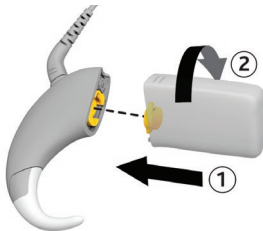

Conectar

O processador é ativado automaticamente.




## Carregar o módulo de baterias recarregáveis



Posicione e encaixe a bateria na entrada do Carregador da Bateria Cochlear Nucleus. Gire em sentido horário.

Conecte o carregador da bateria ao adaptador elétrico e ligue na tomada de alimentação.

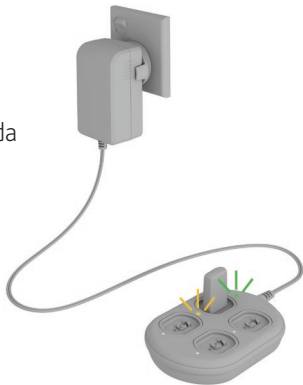

LIGAR

## LUZES

## O QUE SIGNIFICA



Laranja constante

O módulo de baterias está sendo recarregado.




Verde constante

O módulo de baterias está totalmente carregado.

# Troque as baterias não recarregáveis




Gire o parafuso de bloqueio em sentido anti-horário para desbloquear a tampa de bateria resistente a interferências (gire em sentido horário para bloquear).

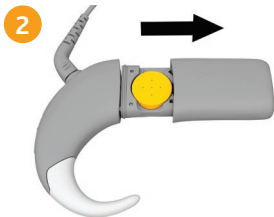

Deslize para abrir.



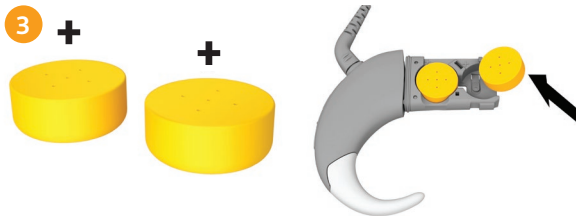

Insira duas novas baterias não recarregáveis p675 de zinco-ar de alta potência (sem óxido de prata e não alcalinas) com o lado liso voltado para cima.

O processador é ativado automaticamente.

# Ligar e desligar

Conecte a bateria ou pressione rapidamente o botão inferior para ligar.

Pressione e segure o botão inferior (durante dois segundos) para desligar.



## Bloquear botões do processador

Rapidamente, pressione e solte os dois botões de uma vez para bloquear e desbloquear os botões. (A luz laranja indica que os botões estão bloqueados.)



# Alterar programas

Rapidamente, pressione e solte o botão inferior para alterar os programas.



O número de beeps  
ou a luz **verde** piscante  
(se configurado pelo  
seu audiólogista) indica  
o número do programa.



uso

## Acessórios sem fios

Utilize os acessórios sem fio Cochlear (Mini Microfone, TV Streamer, Clipe para Telefone) para receber entrada de áudio sem fio em seu processador de som.

### NOTA

Antes de poder transmitir áudio, é necessário conectar o acessório sem fio ao seu processador. Consulte o Guia do usuário de acessórios sem fio Cochlear para obter detalhes.



### NOTA

Os controles do Clipe para Telefone são utilizados para fazer e receber chamadas.






USO

Pressione demoradamente o botão superior para iniciar a transmissão de áudio a partir do Mini Microfone ou TV Streamer.

Pressione rapidamente para desligar.

**Azul:** O acessório sem fio está transmitindo áudio.

**Verde:** microfones estão funcionando.

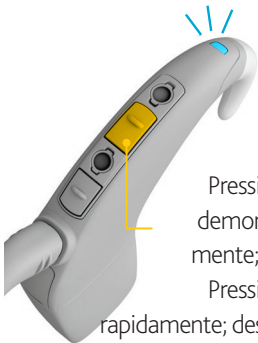

Pressionar demoradamente; ligar

Pressionar rapidamente; desligar

### SUGESTÃO

Pressione demoradamente novamente para alternar para o acessório sem fio conectado seguinte.



# Acessórios de áudio para conexão

(somente CP910)



Abra cuidadosamente a tampa de acessórios.



Insira o conector de acessórios na entrada de acessórios.



Insira a outra extremidade do cabo de acessório no dispositivo compatível, como um reproduutor de música, por exemplo.



## SUGESTÃO

Quando acessórios de áudio são conectados, você pode pressionar rapidamente o botão superior para alterar entre microfones e acessórios de áudio.



uso

# Telebobina

Ouçã receptores auriculares e vozes no telefone com a telebobina. Seu audiologista pode configurar o processador com a telebobina manual e também com a telebobina automática. A telebobina automática detecta automaticamente o sinal. Ao usar um telefone compatível com a telebobina ou ao se mover dentro do alcance de um receptor auricular, a telebobina automática se alterna para 'recebendo'. Quando não há sinal, ou seja, se você estiver fora de alcance de um receptor auricular, a telebobina automática se alterna para 'standby' (não recebendo).

Pressione rapidamente o botão superior para ativar ou desativar a telebobina manual.

**Azul:** telebobina/ acessório estão funcionando.

**Verde:** microfones estão funcionando.



# Luzes

## Uso diário

| LUZES                                                                             | O QUE SIGNIFICA                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | O processador pisca ao receber som da telebobina/acessório de áudio (caso configurado pelo seu audiologista). |
|  | O processador pisca ao receber som de microfones (caso configurado pelo seu audiologista).                    |
|  | Ativação e alteração de programas. O número de piscadas indica o número do programa atual.                    |
|  | Desligar o processador.                                                                                       |

## Botões de bloqueio

| LUZES                                                                             | O QUE SIGNIFICA                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Bloquear botões do processador.            |
|  | Desbloquear botões do processador.         |
|  | Os botões do processador estão bloqueados. |



LUKAS

## Acessórios sem fios

| LUZES                                                                             | O QUE SIGNIFICA                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | A conexão ao acessório sem fio foi realizada com êxito. |

## Telebobina/acessórios de áudio para conexão

| LUZES                                                                             | O QUE SIGNIFICA                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Alteração do microfone para a telebobina/acessório de áudio para conexão. |
|  | Alteração da telebobina/acessório de áudio para conexão para microfone.   |

## Alertas

| LUZES                                                                             | O QUE SIGNIFICA                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Processador pisca quando a bobina está desativada (ou conectada ao implante errado).                  |
|  | A bateria do processador está vazia<br>Carregar bateria.                                              |
|  | Falha. Entre em contato com o seu audiologista. Permanece ligado até que o problema seja solucionado. |





**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus e o logotipo elíptico são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2015

*Hear now. And always*

543861 ISS2

Brazilian Portuguese translation of 402592 ISS7 MAR15