



Cochlear®
Hear now. And always

Cómo usar el mando a distancia básico CR310

1 Encienda el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia arriba.



3 Puede ajustar el volumen con los botones del lado derecho.

Aumentar el volumen o la sensibilidad (si está disponible)

Reducir el volumen o la sensibilidad



2 Puede ajustar sus programas con los botones de flecha del lado izquierdo.

Programa siguiente

Programa anterior



4 Apague el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia abajo.

Nota: La batería del mando a distancia CR310 puede durar hasta 3 meses.*



Nota: Utilice únicamente baterías redondas de litio estándar CR2032 o 5004LC de 3 V en su mando a distancia básico.

Para obtener ayuda, llame a la Asistencia con el dispositivo al 800 483 3123 y luego seleccione la opción 2.

* La vida útil de la batería puede variar de un individuo a otro.

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida de la audición. Los resultados pueden variar y su profesional de salud le informará acerca de los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントウア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.



Cómo usar el transmisor para TV con el mando a distancia CR 310


- 1** Asegúrese de que el TV Streamer esté conectado a la pared y al televisor.

Las luces naranjas y verdes se iluminarán fijas en el TV Streamer.



- 4** Puede empezar a usar el TV Streamer ahora.

Ajuste el volumen con los botones + o - situados en la parte superior del TV Streamer.

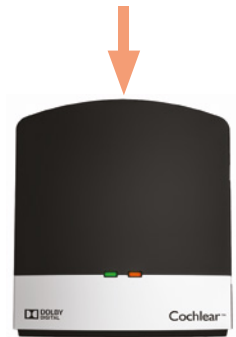

- 2** Encienda el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia arriba.



- 5** Para detener la transmisión, pulse rápidamente el botón plateado del mando a distancia una vez.

El icono adicional desaparecerá.



- 3** Mantenga pulsado el botón plateado del mando a distancia durante 2 segundos para iniciar la transmisión.

Verá que aparece un icono adicional en la pantalla.

Si el TV Streamer está emparejado en la ranura 2, mantenga pulsado el botón plateado del mando a distancia durante 2 segundos más.



- 6** Apague el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia abajo.

Nota: La batería del mando a distancia CR310 puede durar hasta 3 meses.*



Para obtener ayuda, llame a la Asistencia con el dispositivo al 800 483 3123 y luego seleccione la opción 2.

* La vida útil de la batería puede variar de un individuo a otro.

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida de la audición. Los resultados pueden variar y su profesional de salud le informará acerca de los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.

Cómo usar el Mini Microphone 2+ de Cochlear™ con el mando a distancia CR310



- 1** Encienda el micrófono al mantener pulsado el botón gris de la parte superior durante 2 segundos.

Verá una luz verde intermitente.



- 4** Para detener la transmisión, pulse rápidamente el botón plateado del mando a distancia una vez.

El icono adicional desaparecerá.



- 2** Encienda el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia arriba.



- 5** Apague el micrófono al mantener pulsado el botón gris de la parte superior durante 2 segundos.

Verá una luz roja.



- 3** Mantenga pulsado el botón plateado del mando a distancia durante 2 segundos para iniciar la transmisión.

Verá que aparece un icono adicional en la pantalla.

Si el micrófono está emparejado en la ranura 2, mantenga pulsado el botón plateado del mando a distancia durante 2 segundos más.

Puede empezar a usar el micrófono ahora.



- 6** Apague el mando a distancia al deslizar la barra gris del costado hacia abajo.

Nota: Cargue el Mini Microphone 2+ todas las noches.

Nota: La batería del mando a distancia CR310 puede durar hasta 3 meses.*



Para obtener ayuda, llame a la Asistencia con el dispositivo al 800 483 3123 y luego seleccione la opción 2.

* La vida útil de la batería puede variar de un individuo a otro.

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida de la audición. Los resultados pueden variar y su profesional de salud le informará acerca de los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, コクレア Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.



Cochlear®
Hear now. And always

Cómo cargar el procesador de sonido Kanso® 2

- 1 Retire el procesador de sonido de la cabeza.



- 3 Cierre la tapa. Su procesador de sonido parpadeará en color verde mientras se está cargando. La carga puede tardar hasta 4.5 horas.



- 2 Asegúrese de que el cargador principal esté conectado a la toma eléctrica de la pared con el adaptador que se encuentra en el kit. Abra la tapa y coloque el procesador de sonido en el cargador principal.



- 4 Cuando esté completamente cargado, la luz del procesador de sonido se iluminará en color verde fijo. Puede abrir la tapa y retirar el procesador de sonido. Ya está listo para usar.



Para obtener ayuda, llame a la Asistencia con el dispositivo al 800 483 3123 y luego seleccione la opción 2.

La vida útil de la batería puede variar de una persona a otra.

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida de la audición. Los resultados pueden variar y su profesional de salud le informará acerca de los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.

Cómo cargar el procesador de sonido Nucleus® 8

1 Retire el procesador de sonido de la cabeza.

2 Extraiga la batería girándola hacia la izquierda.



3 Asegúrese de que el cargador de baterías en Y de Cochlear™ esté conectado a la toma eléctrica de la pared y, a continuación, gire la batería hacia la derecha en el cargador.



4 El cargador parpadeará en color verde mientras la batería se está cargando.



5 Cuando la batería esté completamente cargada, la luz del cargador estará encendida fija en color verde.



Está lista para volver a conectarse a su procesador de sonido Nucleus 8.

Para obtener ayuda, llame a la Asistencia con el dispositivo al 800 483 3123 y luego seleccione la opción 2.

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida de la audición. Los resultados pueden variar y su profesional de salud le informará acerca de los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.